




Pompe Rythmic Evolution

Programmer la pompe Rythmic

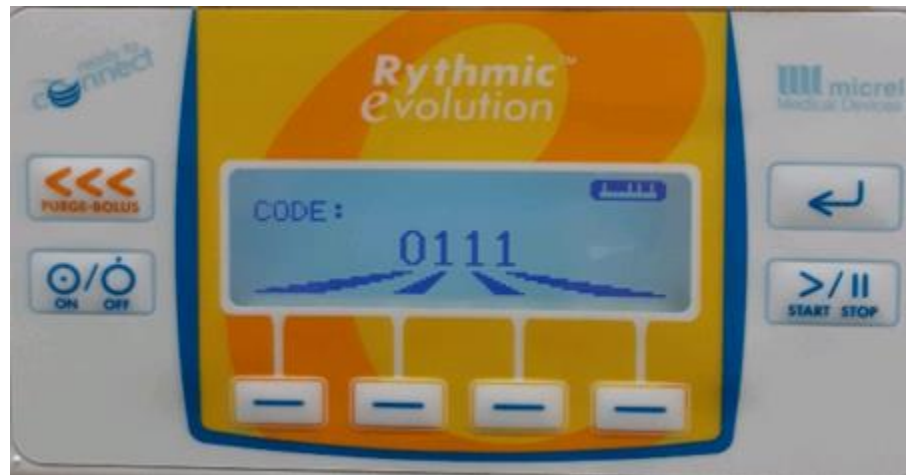


**1- Allumer
la pompe**

2- Sélectionner le Code

3- Valider

Programmer la pompe Rythmic

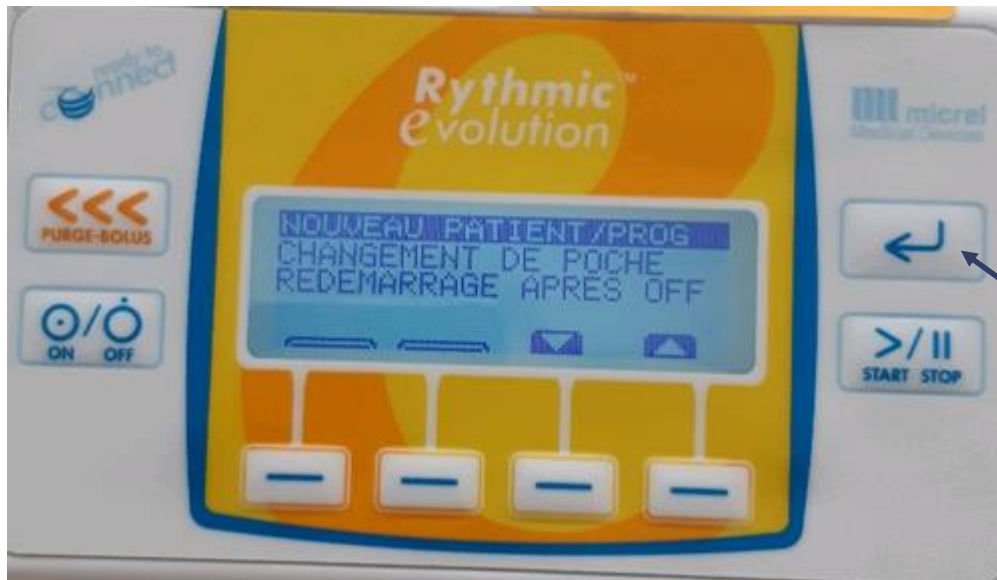


Choisir une
nouvelle
programmation

Programmer la pompe Rythmic



Programmer le débit

Valider

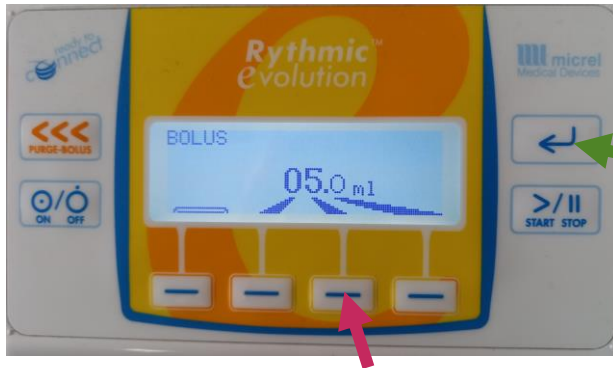

Programmer les bolus

Valider



Programmer la période réfractaire

Valider

Programmer le Bolus
max/ 4h (pas
obligatoire)



Valider

Volume à perfuser


=

Poche de 200ml de Ropivacaine



Valider

Résumé de la programmation

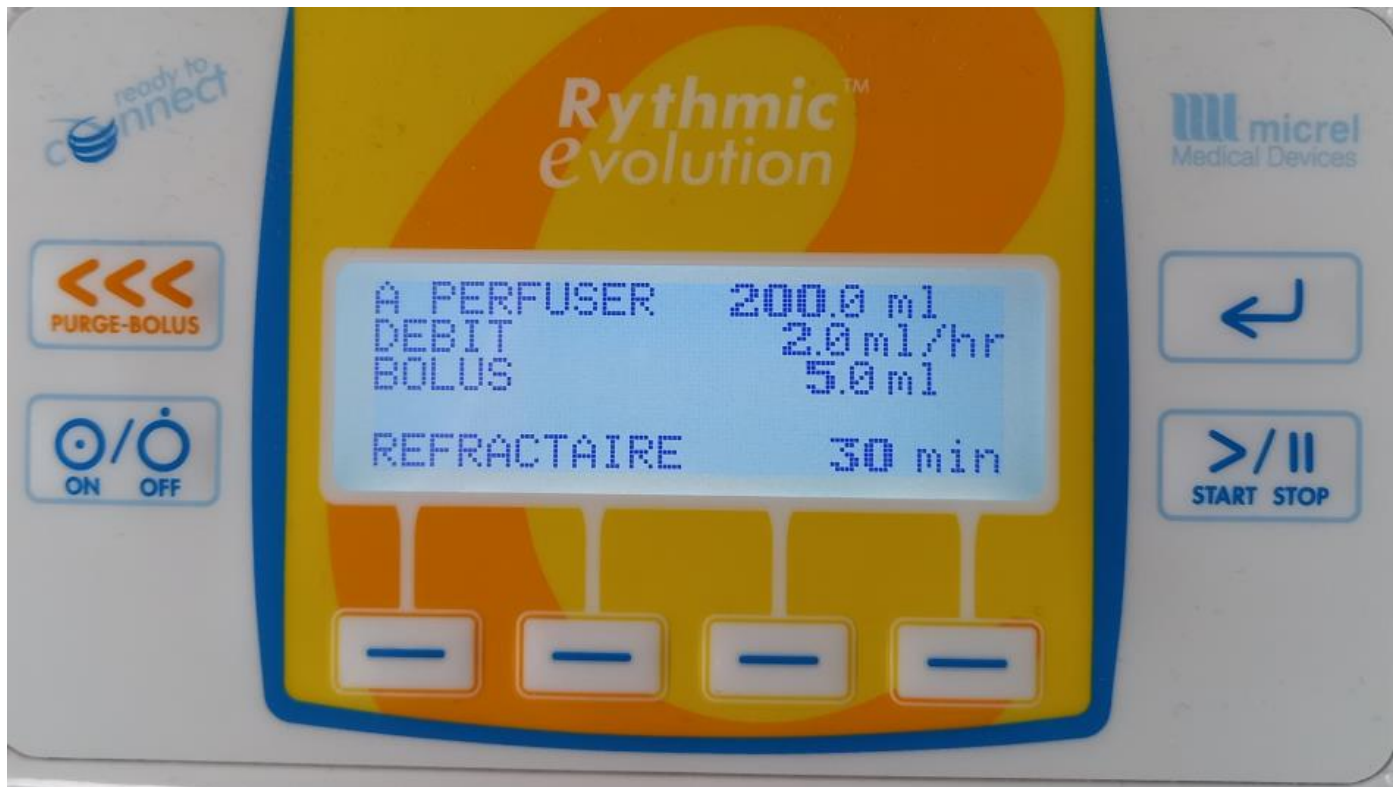

Purge de la ligne



On peut purger l'air de la poche avec le set de remplissage mis à disposition pour le changement simple de la poche , la ligne est déjà purgée

Après la programmation: pompe en pause




Appuyer **2 fois** sur  pour démarrer la pompe

Pompe en marche




Clic pour relever **l'historique**

Mise en place de la ligne de perfusion

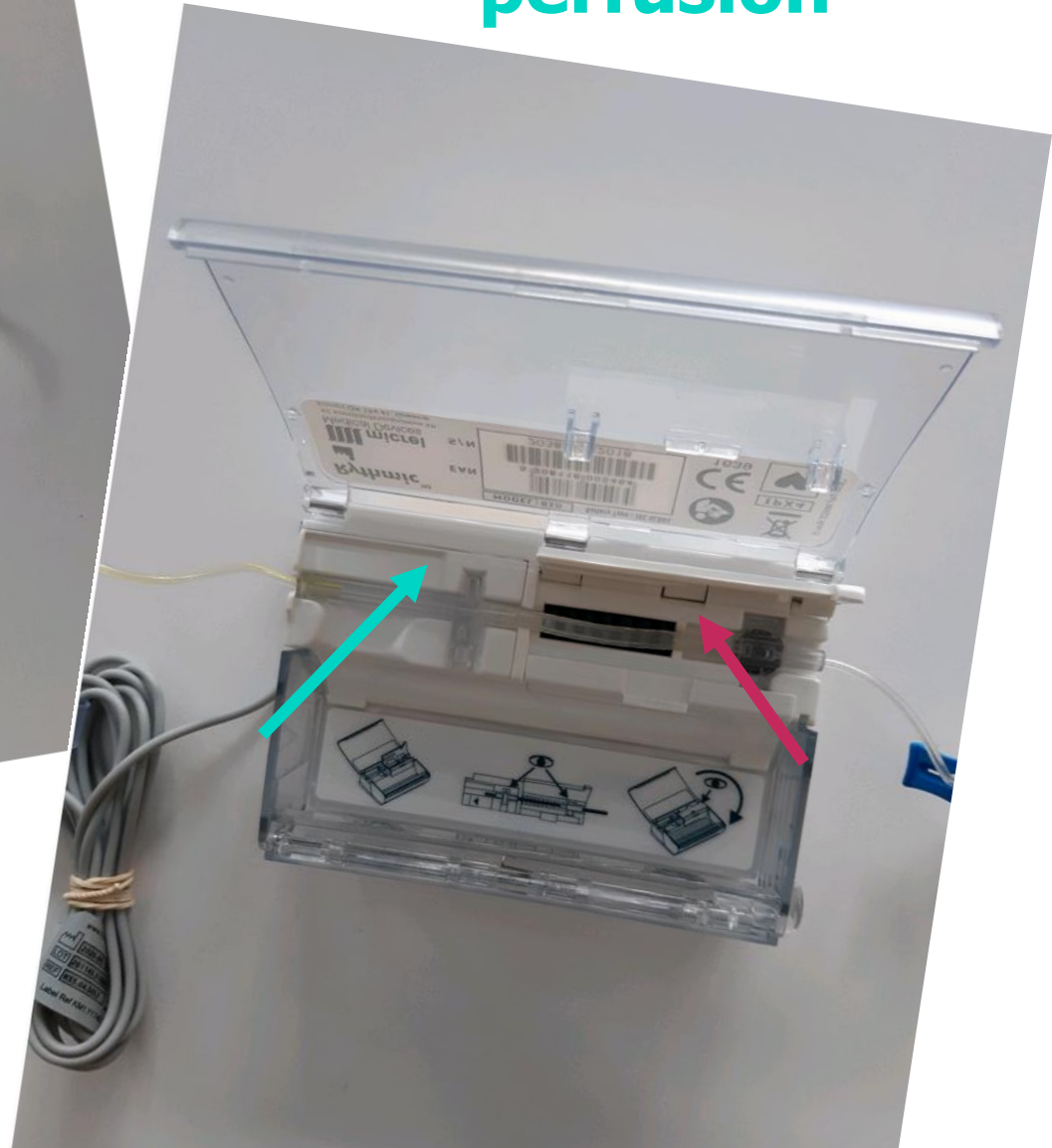

Place de la pile

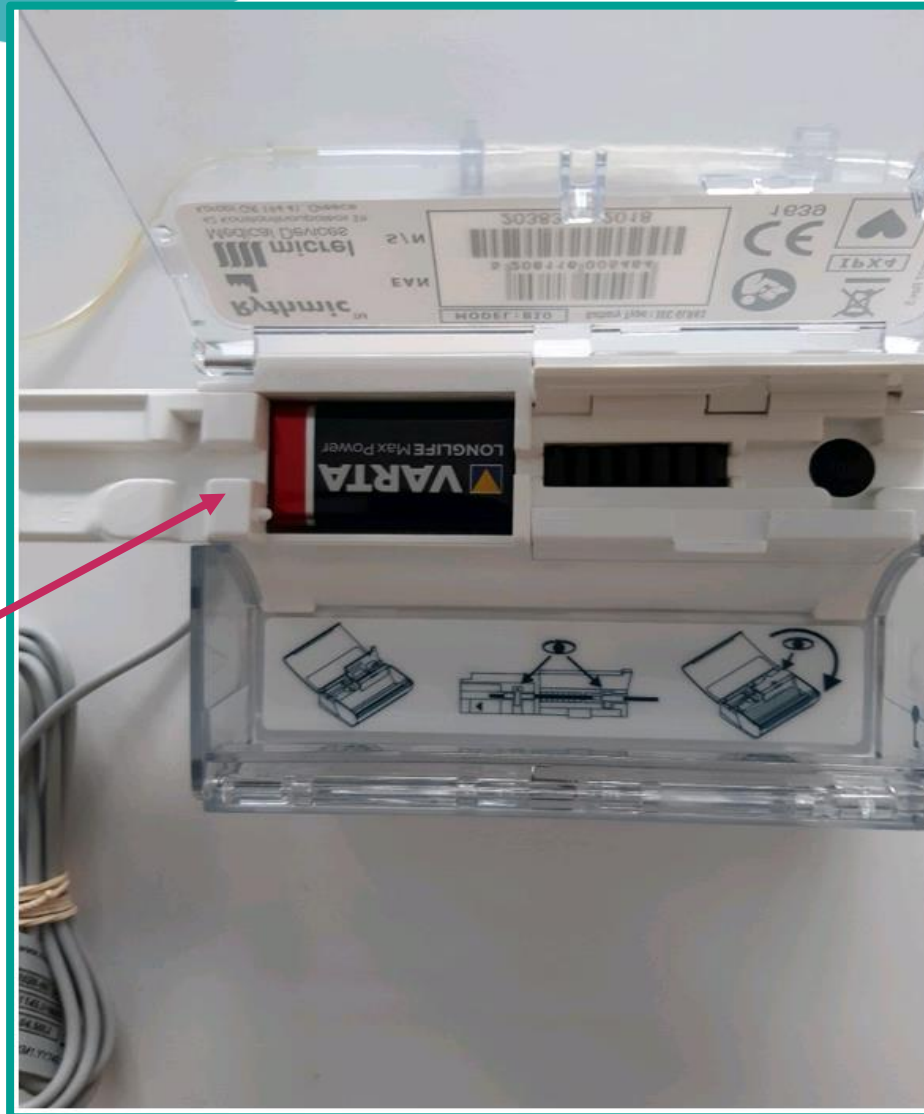

**Juste derrière
l'emplacement
de la tubulure**

Le cathéter périnerveux

